

SALIVA – Tubos Silanizados

ETIQUETAR el tubo de recogida de fluido oral

Solicitar al paciente que acumule saliva en la cavidad oral durante 4–5 min

Debe ir **vertiendo toda la saliva** en el tubo, sin forzar su producción (salivación pasiva), **REBASANDO la marca** dibujada en él

**Evitar esputos o gargajos, en la medida de lo posible, y comprobar que no hay restos de sangre en la saliva (de haberlo, anotarlos)*




Tapar el tubo con su tapón de silicona y precintarlo.

Llevar INMEDIATAMENTE la muestra A LA NEVERA

SANGRE VENOSA – Tubo EDTA

ETIQUETAR el tubo

Extraer la muestra por el procedimiento normal de extracción

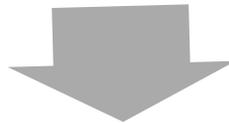

A NEVERA inmediatamente