

SANGRE CAPILAR – Dispositivos MITRA VAMS

ETIQUETAR el estuche contenedor del dispositivo Mitra VAMS y abrirlo.
Frotar los dedos del/la paciente hasta calentarlos y desinfectar la zona.
Pinchar con lanceta la yema de un dedo (se recomienda elegir un lateral)



Descartar rápidamente la 1ª gota limpiándola (contiene líquido intersticial)
“Exprimir” (apretar el dedo en sentido ascendente) **con delicadeza** para obtener una nueva gota, grande y redonda



Poner en contacto (sin sumergir completamente) **perpendicularmente** la “punta” del dispositivo con la gota de sangre
Esperar a que la punta del dispositivo se impregne completamente
Dejar 2 segundos más la Mitra en contacto con la sangre para asegurar su completa absorción interna




Cerrar el estuche.

(Dejar secar a temperatura ambiente mín. 2 horas)

Guardar en sobre con desecante

ETIQUETAR el sobre
(1 Mitra VAMS/paciente)

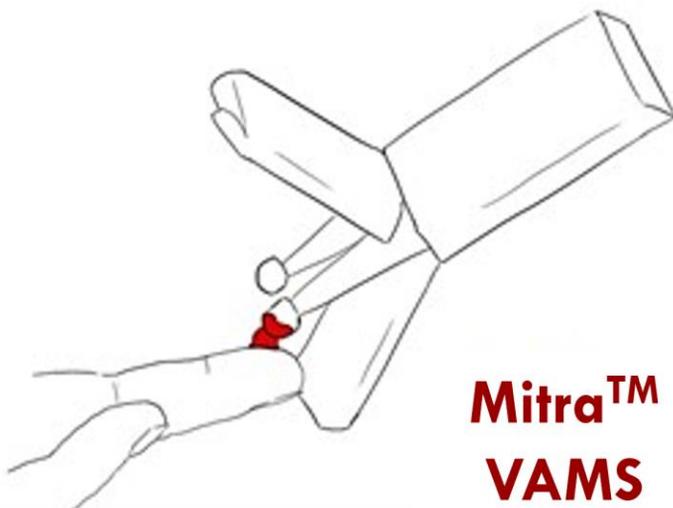

SANGRE CAPILAR – Tarjetas Whatman 903

ETIQUETAR la tarjeta Whatman 903 y abrirla.

Frotar los dedos del/la paciente hasta calentarlos y desinfectar la zona.
Pinchar con lanceta la yema de un dedo (recomendación: por un lateral)




Descartar rápidamente la 1ª gota limpiándola (contiene líquido intersticial)
“Exprimir” (apretar el dedo en sentido ascendente) **con delicadeza** para obtener una gota nueva




Dejar caer las gotas en “caída libre” desde la yema del dedo hasta el círculo marcado en la tarjeta. NO presionar el dedo contra el papel.

Llenar completamente de sangre ambos círculos premarcados pero sin salirse del trazado (ver imagen)

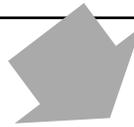

DBS convencionales

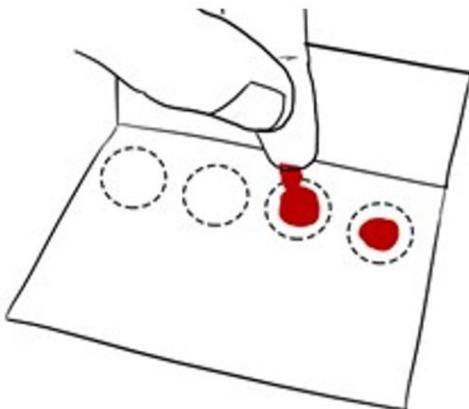

Dejar secar a temperatura ambiente mín 2h

Guardar en sobre con desecante

ETIQUETAR el sobre
(2 gotas/paciente)

